

BARRIER® EasyWarm®+ Aktiv selbstwärmende Patientendecke



- Automatische Erwärmung der Decke nach Öffnung. Die Decke erwärmt sich innerhalb von 30 Minuten auf durchschnittlich 44 °C und hält die Temperatur über einen Zeitraum von 10 Stunden. Die Hauttemperatur erreicht unter den Wärmepads ein Maximum von 42 °C.
- Hilft, eine Hypothermie in der gesamten perioperativen Phase zu verhindern.
- Ohne Zubehör und Strom einsetzbar, daher sehr flexibel für den prä-, intra- sowie postoperativen Bereich.
- Flexible Anwendung durch 2-teiliges Design.



Hinweise zur Abdeckung



1. Öffnen Sie die Einzelverpackung an der Einkerbung in der oberen linken Ecke. Entnehmen Sie BARRIER EasyWarm+ aus der Umverpackung.



2. Öffnen und entfalten Sie BARRIER EasyWarm+ vollständig und achten Sie darauf, die Decke nicht doppelt zu legen. Die Decke erwärmt sich innerhalb von 30 Minuten auf durchschnittlich 44 °C und hält die Temperatur über einen Zeitraum von 10 Stunden. Die Hauttemperatur erreicht unter den Pads ein Maximum von 42 °C.



3. Platzieren Sie BARRIER EasyWarm+ mit den Wärmepads nach oben. Die weiße Seite zeigt zum Patienten. Vermeiden Sie zusätzliches Gewicht auf den Pads.



4. Während und nach dem Eingriff sowie bei Eingriffen an Hand/Armen und Kopf platzieren Sie BARRIER EasyWarm+ auf dem gesamten Körper.



5. Bei Eingriffen im unteren Bauchbereich teilen Sie BARRIER EasyWarm+ und legen den oberen Teil über Brust und Extremitäten.



6. Für Eingriffe oberhalb des Genitalbereichs teilen Sie BARRIER EasyWarm+ und legen den unteren Teil über Hüftbereich und Beine.



7. Bei Eingriffen im Bauchbereich teilen Sie BARRIER EasyWarm+ und legen den oberen Teil über Brust und Extremitäten, den unteren Teil über Hüftbereich und Beine.



8. Der obere und untere Bereich kann leicht durch einen Klettverschluss getrennt und wieder zusammengefügt werden. Der untere Bereich kann zusätzlich an der dafür vorgesehenen Markierung in zwei Teile geschnitten werden. Dies ermöglicht den Einsatz bei unterschiedlichsten Lagerungen.

Anwendungshinweise

- Die Decke nicht doppelt legen.
- Bei Röntgenuntersuchungen nicht auf den zu röntgenden Bereich legen und keine Anwendung bei MRT.
- Die Wärmepads müssen nach oben zeigen.
- Anwendung nur unter ärztlicher oder pflegerischer Aufsicht.
- Es wird empfohlen, direkten Kontakt mit Blutergüssen, Schwellungen und Erfrierungen zu vermeiden. Bei Patienten mit verminderter Sensibilität und eingeschränkter Reaktions- und Kommunikationsfähigkeit sollte eine mögliche Hautreaktion gemäß der Krankenhausroutine regelmäßig überprüft werden.
- Nach Gebrauch kann BARRIER EasyWarm+ mit dem Hausmüll entsorgt werden und der Verbrennung zugeführt werden.



Warnhinweise

- Die Wärmendecke ist ein aktives therapeutisches Produkt und muss **entsprechend der Gebrauchsanweisung benutzt werden, um mögliche thermische Verletzungen zu vermeiden.**
- Bei anhaltender Hypotonie sollte der Einsatz der Patientendecke unterbleiben.
- BARRIER EasyWarm+ ist nicht für die Anwendung bei Personen unter 18 Jahren geeignet.
- Die Patientendecke sollte nicht in Fällen schwerer peripherer Gefäßerkrankungen zum Einsatz kommen.

Lagerungen bei verschiedenen Eingriffen

BARRIER EasyWarm+ ist flexibel und für den Einsatz bei unterschiedlichsten Lagerungen des Patienten geeignet. Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen, wie die Wärmendecke bei den gängigen Eingriffen eingesetzt werden kann.



Abdominalchirurgie



Laparoskopische Eingriffe



Eingriffe am Knie



Eingriffe an der Schulter



Eingriffe an der Schulter



Eingriffe an der Wirbelsäule



Urologie /Gynäkologie



Urologie /Gynäkologie



Eingriffe an der Schulter



Eingriffe an der Wirbelsäule



Urologie /Gynäkologie



Urologie /Gynäkologie

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629910	<p>BARRIER EasyWarm+ aktiv selbstwärmende Patientendecke</p> <p>Produkt: 12 luftaktivierte Wärmepads (13 cm x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind. Die Größe der Decke beträgt 110/150 x 200 cm.</p> <p>Material: Verschiedene Lagen aus SMS (Polypropylen). Die einzelnen Lagen sowie die Taschen sind mit Polyester/Baumwollgarnen miteinander vernäht. Die Wärmepads bestehen aus luftdurchlässigen Beuteln, die Aktivkohle, Mineralien, Salz, Wasser und Eisenpulver beinhalten.</p> <p>Verpackung: Vakuumverpackt in einem luftdichten Polymerbeutel. Die Beutel sind mit Luftpolsterfolie in einem Transportkarton eingeschlagen.</p> <p>Versandeinheit: 7 Stück</p>	-/7

Alle aufgeführten Bestandteile des Sets sind auch für Mölnlycke® OP-Trays erhältlich.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Deutschland, T +49 (0)211 920 880, F +49 (0)211 920 88 170, www.molnlycke.de
Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, Österreich, T +43 1 278 85 42, F +43 1 278 85 42 199, www.molnlycke.at
Marke, Name und Logo von Mölnlycke, BARRIER und EasyWarm sind global eingetragene Marken der Mölnlycke Health Care Gruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

