

# Tubifast®

## Elastischer, längs- und querdehnbarer Schlauchverband


Tubifast 2-Way Stretch hält Verbände sicher in Position, ohne einzuengen oder Druck auszuüben

Keine Sicherheitsnadeln oder Klebebänder zur Sicherung notwendig

Schnell und einfach in der Anwendung – zuschneiden und überstreifen für gleichmäßigen, bequemen Sitz

Schnelle und einfache Anwendung reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination

Geringeres Ausfransen und damit geringeres Risiko, dass Fasern in Wunden gelangen<sup>2</sup>

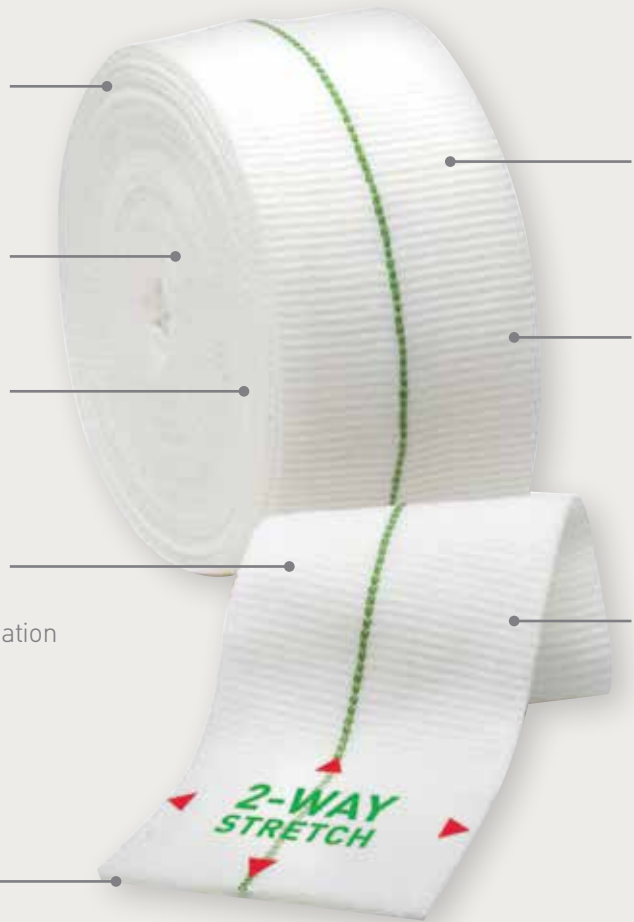

Auf gewünschte Länge zuschneidbar – ist kostengünstig und vermeidet Abfall


In fünf farblich markierten Breiten erhältlich – für gute Anpassung an alle Gliedmaßen unabhängig von Größe oder Form

Dehnfähigkeit in beide Richtungen von Tubifast 2-Way Stretch – für volle Bewegungsfreiheit und Komfort des Patienten<sup>1</sup>

WITH  
**2-WAY STRETCH**®  
TECHNOLOGY

- Längs- und Querdehnbarkeit für sichere Fixierung
- Gute Elastizität für ausreichende Bewegungsfreiheit

## Applikation

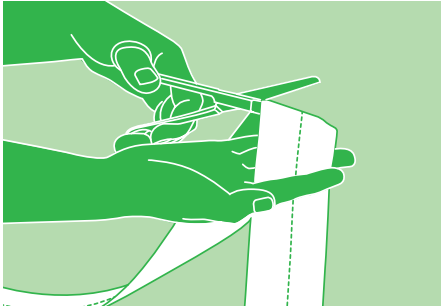

Wählen Sie die korrekte Breite anhand der farbigen Markierung und schneiden Sie die benötigte Länge ab.



Streifen Sie Tubifast 2-Way Stretch über den betreffenden Bereich.



Decken Sie den Verband mit Tubifast 2-Way Stretch ab. Für die Anwendung an komplizierteren Körperarealen stehen illustrierte Anleitungen zur Verfügung.

## So funktioniert Tubifast® 2-Way Stretch®

Tubifast 2-Way Stretch sichert Verbände, ohne einzuengen oder Kompression zu verursachen. Nadeln oder Klebebänder zur zusätzlichen Fixierung sind nicht notwendig. Die Dehnfähigkeit in beide Richtungen sorgt für volle Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Tragekomfort.

Tubifast 2-Way Stretch ist in fünf verschiedenen Breiten für gute Anpassung an Gliedmaßen aller Größen und Formen lieferbar.

Die einzelnen Größen sind durch eingewebte, farbige Fäden gekennzeichnet.

## Vorteile von Tubifast® 2-Way Stretch®

- Dehnfähigkeit in beide Richtungen sorgt für volle Bewegungsfreiheit und Komfort<sup>1</sup>
- Kostengünstiger Verbrauch mit minimalem Abfall
- Lieferbar in mehreren farbig markierten Größen zur Anpassung an Körperarealen jeder Größe – von kleinen Gliedmaßen bis hin zu erwachsenen Oberkörpern
- Geringeres Ausfransen sorgt für minimiertes Risiko von Fasern in der Wunde<sup>2</sup>

## Fasergehalt

Viskose, Elastan und Polyamid.

## Waschanleitung



## Anwendungsempfehlungen

Tubifast 2-Way Stretch kann zum Sichern von Verbänden, zum Abdecken von Hautpartien an beliebigen Körperarealen oder als Unterstrumpf verwendet werden.

Aufgrund seiner schlauchförmigen Ausführung eignet sich Tubifast 2-Way Stretch auch zum Sichern von Verbänden in schwierigen Bereichen, wie z.B. Amputationsstümpfen.

Tubifast 2-Way Stretch und das Verpackungsmaterial enthalten kein Latex.

REFERENZEN: 1. Veröffentlichte Daten weisen nach, dass Tubifast® 2-Way Stretch® die Mindestanforderungen an die Längsdehnung beim Sitzen, Bücken und Beugen übertrifft. Physikalische Tests von Textilien durch B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999. 2. Data on file – Fibre Sur vey carried out on behalf of Mölnlycke Health Care Limited, May 2009.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.  
Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und die Produkte Tubifast® und 2-Way Stretch® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0048

## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmaße	PZN/ Packung	PZN/ Stück
----------	--------	---------------------	-----------------	---------------

### Home Care & Klinik

#### 10 m Länge


24 34	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	09 93 26 91	---
24 36	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	09 93 27 16	---
24 38	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	09 93 27 39	---
24 40	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	09 93 27 45	---
24 44	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	09 93 27 68	---

### Home Care

#### 1 m Länge

24 80	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	09 93 277 4	00 14 35 38
24 81	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	09 93 27 80	09 93 28 28
24 82	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	09 93 27 97	09 93 28 34
24 83	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	09 93 28 05	09 93 28 40
24 79	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	09 93 28 11	09 93 28 57

Unsteril – 10m-Produkte auf Rolle, 1m-Produkte einzeln verpackt

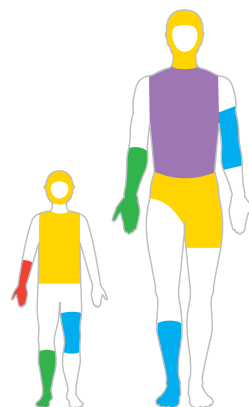

Größen- und Anwendungsübersicht

  
**Mölnlycke®**