


# Melgisorb® Plus

## Absorbierender Alginatverband

### PVA Fasertechnologie

- Exzellente Absorption – für stark exsudierende Wunden
- Hohe Faserfestigkeit im feuchten Zustand – in einem Stück zu entfernen
- Hohe Retention – zur Minimierung von Mazerationen

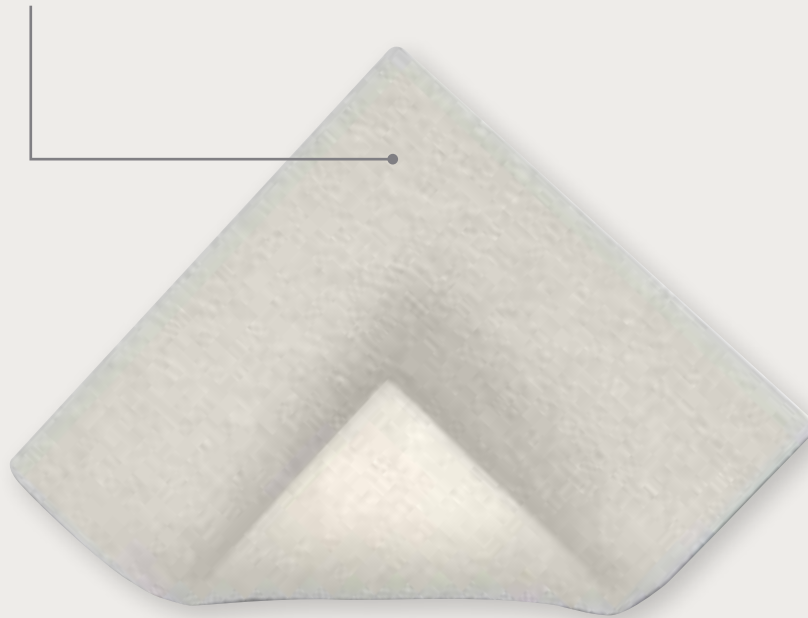


Melgisorb Plus ist ein stark absorbierendes Kalzium-Natrium-Alginat für eine Vielzahl mittel bis stark exsudierender Wunden.


Melgisorb® Plus

  
Mölnlycke®

## Anwendungshinweise

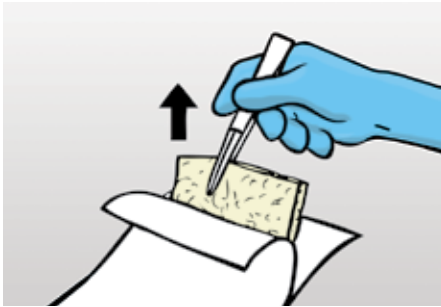


1. Wählen Sie einen Verband aus dem Melgisorb Plus Sortiment und öffnen Sie die Verpackung durch Auseinanderziehen der Laschen.

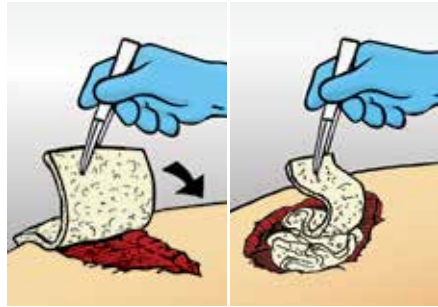

2. Applizieren Sie Melgisorb Plus auf das feuchte Wundbett.

Flache Wunden: Wählen Sie eine Kompresse in geeigneter Größe, um die ganze Wunde abzudecken.

Tiefe Wunden und Wundhöhlen: Schneiden Sie die Tamponade auf eine geeignete Länge zu und füllen Sie die Wundhöhle locker aus.

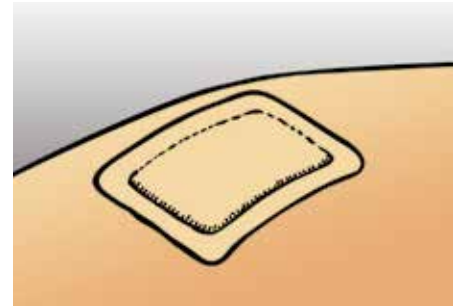

3. Decken Sie Melgisorb Plus mit einem geeigneten Sekundärverband ab, z.B. mit Mepilex Border Flex.  
Melgisorb Plus kann unter Kompression angewendet werden.

## So funktioniert Melgisorb® Plus

Melgisorb Plus absorbiert eine große Menge an Wundexsudat und wird zu einem Gel umgewandelt. Dieses Gel schließt freie Bestandteile in der Wunde ein, sorgt für ein feucht-warmes Wundklima und unterstützt so eine optimale Wundheilung. Es kann leicht mit 0,9%iger Kochsalzlösung entfernt werden.

## Vorteile von Melgisorb® Plus

- Hoch absorbierend
- Bildet ein Gel in Kontakt mit Wundexsudat oder NaCl-haltigen Lösungen
- Aus dem feuchten Wundbett leicht zu entfernen
- Für Wundhöhlen geeignet
- Weich, formbar und anpassungsfähig
- Kann auf eine geeignete Größe zurecht geschnitten werden

## Anwendungsempfehlungen

Melgisorb Plus ist für eine Vielzahl mittel bis stark exsudierender, infizierter und nicht infizierter Wunden geeignet, wie z.B. für

- Dekubitalgeschwüre
- Venöse und arterielle Ulcera
- Hautentnahmestellen
- Postoperative Wunden
- Hautabschürfungen und andere traumatische Wunden

Melgisorb Plus kann für flache und tiefe Wunden sowie Wundhöhlen angewendet werden.

## Wichtige Hinweise!

Melgisorb Plus ist für trockene Wunden, Verbrennungen 3. Grades und für chirurgische Implantationen nicht geeignet. Wenn der Verdacht einer Wundinfektion vorliegt, sollte die weitere Behandlung gemäß den durch den behandelnden Arzt festgelegten Richtlinien fortgeführt werden.

## Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung
<b>Kompressen</b>			
25 20 00	5 x 5 cm	09 93 26 56	10
25 22 00	10 x 10 cm	09 93 26 62	10
25 25 00	10 x 20 cm	09 93 26 79	10
<b>Tamponade</b>			
25 35 00	3 x 45 cm	09 93 26 85	5

Steril – einzeln verpackt



Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.  
Mölnlycke® und das Produkt Melgisorb® Plus sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0039

  
**Mölnlycke®**