

Längenmarkierte Schutzfolie

- Einfach zu entfernen zum wirtschaftlichen Zuschneiden

Wellenförmig perforierte Schutzfolie


- Ermöglicht eine einfachere Handhabung

Polyacrylatkleber

- Hautfreundlich
 - Bindemittelfrei
 - Auf Wasser-Emulsionsbasis


Vlies aus Polyester

- Weiches, elastisches, nichtabsorbierendes Vlies

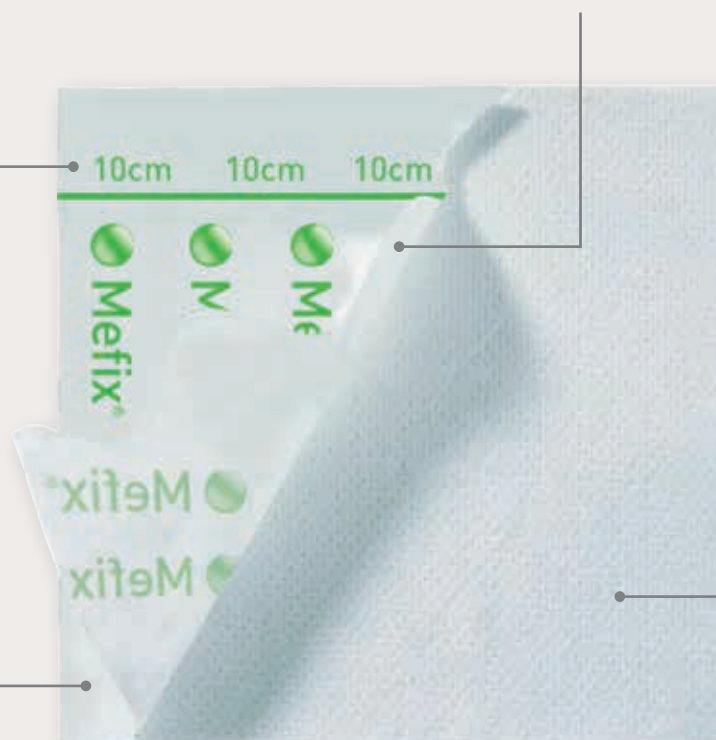


Mefix ist ideal für die Fixierung von Verbänden, Kompressen, Kathetern und Kanülen.


Anwendungshinweise

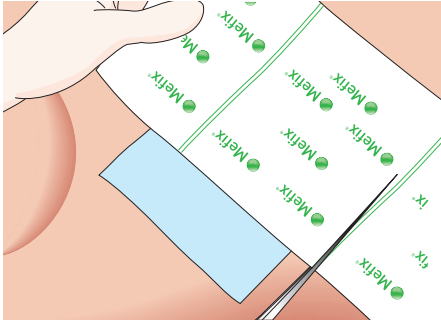

1. Schneiden Sie den Verband auf die gewünschte Größe zu. Trennen Sie die beiden Streifen des Schutzpapiers indem Sie den Verband leicht quer dehnen.

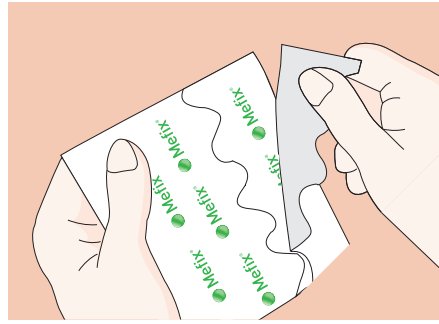

2. Entfernen Sie zuerst den schmalen Streifen der Schutzfolie.

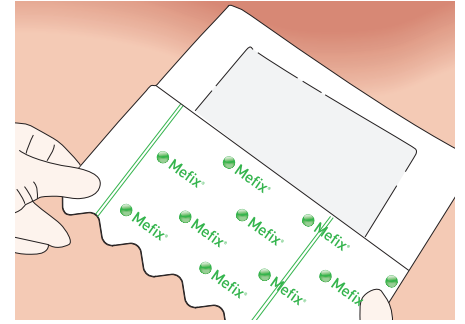

3. Applizieren Sie nun den Teil mit dem freigelegten Kleber auf die Haut. Entfernen Sie das restliche Schutzpapier. Bitte beachten Sie, dass Sie Mefix während der Applikation nicht überdehnen.

Funktionsweise von Mefix®

Die poröse Struktur des Vliesstoffes stellt die Luft- und Wasserdurchlässigkeit sicher. Das Material ist dehnbar, anschniegamsam und erlaubt Körperbewegungen. Außerdem ist es nichtabsorbierend und verhindert so ein Durchnässen. Der Polyacrylatkleber gewährleistet ein sanftes Kleben und gleichzeitig eine sichere Haftung. Die Schutzfolie ist in 10 cm Abständen markiert und wellenförmig perforiert für einfaches und sicheres Entfernen und Applizieren. Mefix kann auf die gewünschte Form und Größe zugeschnitten werden.

Die einzigartige, wellenförmig perforierte Schutzfolie erleichtert die Fixierung und macht das Arbeiten mit Handschuhen schnell und problemlos.

Vorteile von Mefix®

- Hautfreundlicher Kleber auf Basis einer Wasseremulsion
- Längenmarkierte Schutzfolie für einfaches Abmessen/ Zuschneiden
- Kann an bewegungsintensiven Körperstellen appliziert werden
- Luftdurchlässig

Vorsichtsmaßnahmen

Mefix soll nicht unter Spannung angebracht werden. Scherkräfte können eine Verletzung der Haut zur Folge haben. Dies ist besonders wichtig bei der Applikation über Gelenken.

Anwendungsgebiete

Mefix kann unter anderem für die Fixierung von Verbänden, Kompressen, Kathetern und Kanülen eingesetzt werden.

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
31 02 50	2,5 cm x 10 m	03 04 27 95	1	40
31 05 00	5 cm x 10 m	03 04 28 03	1	40
31 10 90	10 cm x 11 m	04 51 81 42	1	20
31 15 90	15 cm x 11 m	04 51 81 59	1	15
31 20 00	20 cm x 10 m	03 04 28 49	1	10
31 30 00	30 cm x 10 m	03 04 28 55	1	10

Unsteril – im Spenderkarton



Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.
Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und die Produkte Mefix® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. Sontara® ist DuPont's registrierte Handelsmarke für das Spunlanced Material. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0052


Mölnlycke®