
















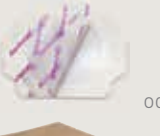




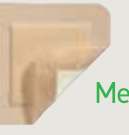

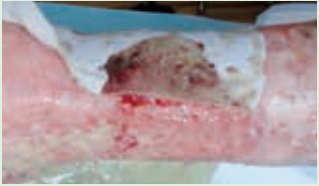












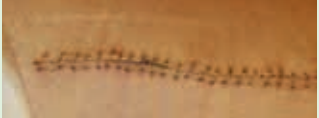







Phasengerechte Wundversorgung

	Inflamationsphase / Reinigungsphase		Granulationsphase		Epithelisierungsphase	Maturationsphase		
Wundart/ Wundzustand	Trockene, fibrinbelagte Wunden: Freiliegende Sehnen, Wunden mit schwacher Exsudation		Kritisch kolonisierte oder infizierte, oberflächliche Wunden oder Wundhöhlen		Feuchte (oberflächliche) Wunden	(Feuchte) Wundhöhlen	Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden	Gewebsausbildung
Beispiel		 						
Exsudation	●	●● bis ●●●		● bis ●●	●	●		
Leitziele 1	<ul style="list-style-type: none"> • Aufweichen der Beläge • Feuchthalten • Wundreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Wundreinigung • Infektionsbekämpfung • ggf. Exsudatmanagement • Wundrandschutz 		<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung eines feuchtwarmen Wundmilieus und Wundruhe • Schutz • Exsudatmanagement • Wundreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutz • Wundruhe 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutz • Gewebeglättung / Stabilität 		
Leitziele 2	Schmerzen minimieren	Schmerzen minimieren		Schmerzen minimieren	Schmerzen minimieren	Schmerzen minimieren		
Wundfüller/-gele	geeignetes Hydrogel	 Melgisorb [®] Ag		 Gelbildender Faserverband: Exufiber [®] , bei Bedarf Wundgel				
LÖSUNG 1	Schaumverband  Mepilex [®] Lite  Tubifast [®]	 Mepilex [®] Ag  Tubifast [®]		 Mepilex [®] XT  Tubifast [®]	 Mepilex [®] Lite  Tubifast [®]	 Mepitel [®] Film oder  Mepiform [®]		
oder LÖSUNG 2	 Mepilex [®] Border Lite	 Mepilex [®] Border Ag		 Mepilex [®] Border Flex		 Mepilex [®] Border Lite		

Lösungen für spezielle Situationen

Situation	Anforderung	Lösung
Sehr stark exsudierende Wunden   	Exsudatmanagement Infektionsprophylaxe/-therapie	 Mepitel [®] One einseitig beschichtetes Wunddistanzgitter  Mepitel [®] beidseitig beschichtetes Wunddistanzgitter  Mepilex [®] Transfer drainagefähiger Schaumverband  Mepilex [®] Transfer Ag drainagefähiger Schaumverband mit Silber für kritisch kolonisierte und infizierte Wunden  Mextra [®] Superabsorbent  Tubifast [®]
Verbrennungen bis Grad 2a 	Atraumatisches und schmerzarmes Wundmanagement, Exsudatmanagement	 Mepilex [®] XT  Tubifast [®]  Mepilex [®] Ag  Tubifast [®]
Chirurgische Wunden 	Exsudatmanagement, Spannungsblasen vermeiden, Hautschutz	Primärversorgung  Mepilex [®] Border Post-Op Zum Schutz nach Nahtverschluß  Mepitel [®] Film
Strahlenbedingte Hautreaktionen 	Schmerzreduzierung, Schutz	 Mepilex [®] Lite  Mepitel [®] Film

Chirurgische Wundversorgung

NEU

Mepilex® Border Post-Op



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
49 61 00	6 x 8 cm	10
49 62 00	9 x 10 cm	10
49 63 00	10 x 15 cm	10
49 64 00	10 x 20 cm	10
49 64 50	10 x 25 cm	10
49 66 00	10 x 30 cm	10
49 66 50	10 x 35 cm	5

Schaumverbände

Mepilex® XT



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
21 11 15	5 x 5 cm	5
21 11 10	12,5 x 12,5 cm	5
21 12 10	10 x 21 cm	5
21 13 10	17,5 x 17,5 cm	5
21 14 10	21 x 22 cm	5
21 15 00	20 x 50 cm	2

Mepilex®



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
29 40 15	5 x 5 cm	5
29 41 00	10 x 10 cm	5
29 42 00	10 x 20 cm	5
29 43 00	15 x 15 cm	5
29 44 00	20 x 20 cm	5
29 45 00	20 x 50 cm	2
Mepilex Heel		
28 81 00	13 x 20 cm	5

Mepilex® Lite



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
28 40 00	6 x 8,5 cm	5
28 41 00	10 x 10 cm	5
28 43 00	15 x 15 cm	5
28 45 00	20 x 50 cm	4

Mepilex® Transfer



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
29 47 00	10 x 12 cm	5
29 48 00	15 x 20 cm	5
29 45 02	20 x 50 cm	4

Mepilex® Border



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
29 52 00	7,5 x 7,5 cm	5
29 53 00	10 x 10 cm	5
29 54 00	15 x 15 cm	5
29 56 00	15 x 20 cm	5
Mepilex Border Sacrum		
28 20 10	16 x 20 cm	10
28 24 10	22 x 25 cm	10
Mepilex Border Heel		
28 27 10	22 x 23 cm	10

Mepilex® Border Lite



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
28 10 00	4 x 5 cm	10
28 11 00	5 x 12,5 cm	5
28 12 00	7,5 x 7,5 cm	5
28 13 00	10 x 10 cm	5
28 15 00	15 x 15 cm	5

Schaumverbände

NEU

Mepilex® Border Flex



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung	
59 52 11	7,5 x 7,5 cm	10	
59 53 11	10 x 10 cm	10	
59 50 11	12,5 x 12,5 cm	10	
59 54 11	15 x 15 cm	10	
59 56 11	15 x 20 cm	10	
oval	28 35 70	7,8 x 10 cm	5
	28 33 00	13 x 16 cm	5
	28 34 00	15 x 19 cm	5

Antimikrobielle Wundauflagen

Mepilex® Ag



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
28 71 10	10 x 10 cm	5
28 72 10	10 x 20 cm	5
28 73 10	15 x 15 cm	5
28 74 10	20 x 20 cm	5
28 75 10	20 x 50 cm	2
Mepilex Heel Ag		
38 81 00	13 x 20 cm	5
38 83 00	15 x 22 cm	5

Mepilex® Border Ag



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
39 52 60	7 x 7,5 cm	5
39 53 60	10 x 12,5 cm	5
39 54 60	15 x 17,5 cm	5
39 56 60	17 x 20 cm	5
39 58 00	10 x 20 cm	5
39 57 00	10 x 25 cm	5
39 59 00	10 x 30 cm	5
Mepilex Border Sacrum Ag		
38 20 00	18 x 18 cm	5
38 22 00	20 x 20 cm	5
38 24 00	23 x 23 cm	5

Mepilex® Transfer Ag



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	10
39 47 00	12,5 x 12,5 cm	5
39 48 00	15 x 20 cm	10
39 45 00	20 x 50 cm	2

Superabsorber

NEU

Mextra® Superabsorbent



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
61 07 00	10 x 10 cm	10
61 07 10	10 x 15 cm	10
61 07 20	10 x 20 cm	10
61 07 30	15 x 20 cm	10
61 07 40	20 x 25 cm	10
61 07 50	20 x 30 cm	10
61 07 60	20 x 40 cm	10

Gelbildender Faserverband

Exufiber®



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
60 33 00	5 x 5 cm	10
60 33 01	10 x 10 cm	10
60 33 02	15 x 15 cm	10
60 33 03	20 x 30 cm	5
60 33 05	4,5 x 10 cm	10
60 33 06	4,5 x 20 cm	10
60 33 07	4,5 x 30 cm	10
Tamponade		
60 33 08	2 x 45 cm	5

Fixierung

Mefix®



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
31 02 50	2,5 cm x 10 m	1
31 05 00	5 cm x 10 m	1
31 10 00	10 cm x 10 m	1
31 15 00	15 cm x 10 m	1
31 20 00	20 cm x 10 m	1
31 30 00	30 cm x 10 m	1

Unsteril auf Rolle

Mepitac®



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
29 83 00	2 x 300 cm	1
29 84 00	4 x 150 cm	1

Unsteril - im Spenderkarton

Tubifast®



Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedermaße	Stück Packung
10 m Länge			
24 34	Rot (3,5 cm)	9-18 cm	1
24 36	Grün (5 cm)	14-24 cm	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24-40 cm	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35-64 cm	1
24 44	Violett (20 cm)	64-130 cm	1

Unsteril - Produkte auf Rolle

Wunddistanzgitter

Mepitel®



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
29 05 10	5 x 7,5 cm	10
29 07 10	7,5 x 10 cm	10
29 10 10	10 x 18 cm	10
29 20 05	20 x 30 cm	5

Mepitel® One



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
28 91 00	5 x 7,5 cm	10
28 93 00	7,5 x 10 cm	10
28 95 00	10 x 18 cm	10
28 97 00	27,5 x 50 cm	2
Mepitel One (auf Rolle)		
28 98 00	9,5 x 150 cm	1

Alginate

Melgisorb® Plus



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
25 20 00	5 x 5 cm	10
25 22 00	10 x 10 cm	10
25 25 00	10 x 20 cm	10
Tamponade		
25 35 00	3 x 45 cm	5

Melgisorb® Ag



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
25 60 50	5 x 5 cm	10
25 61 00	10 x 10 cm	10
25 61 50	15 x 15 cm	10
Tamponade		
25 66 00	3 x 44 cm	10

Folienverbände

Mepitel® Film



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
29 61 70	6 x 7 cm	10
29 62 70	10 x 12 cm	10
29 64 70	10 x 25 cm	10
29 66 70	15 x 20 cm	10

Mepore® FilmRoll



Art.-Nr.	Größe	Stück Packung
27 61 05	5 cm x 10 m	1
27 61 10	10 cm x 10 m	1
27 61 15	15 cm x 10 m	1

Unsteril auf Rolle

Sofern nicht aufgeführt, sind alle Produkte steril - einzeln verpackt.



Weil das Ergebnis zählt.

Mepilex® XT

SafetaC TECHNOLOGIE

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele



Die aufgeführten Verbände können im Rahmen der Erstattung zu Lasten der GKV verordnet werden.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com

Molnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Die Namen Molnlycke Health Care, sowie alle genannten entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2017 Molnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DWC0024

Stand: Januar 2018

Molnlycke®

Molnlycke®

Wundversorgung
Leitfaden Klinik