

Vejledning til fjernelse af operationskittel - og handsker

Fjernelse af beskydt kittel og handsker



1. For at beskytte arbejdsbeklædningen (uniform/renrumsdragt), arme og hænder fra mikrober, der findes på ydersiden af en beskydt kittel og handsker, skal handskerne og kitlen tages af på en helt bestemt måde.



2. Start med at tage den ene, beskydte yderhandske af og smid den væk.



3. Fortsæt med at tage den anden yderhandske af og smid den væk.



4. Tag fat på kitlen ved skulderen eller livet (som på billedet). Hvis det er en fleganskittel, bindes kitlen op. Den assisterende person skal binde ryglukningen op.



5. Træk ryggen og ærmet fra kitlen fremad, og udover den behandskede hånd ved at vende vrangen ud på kitlen og krænge handskens manchets med.



6. Hold arme og kittel væk fra kroppen mens du stadig har vrangen ud på kitlen. Herefter smides kitlen væk.



7. Brug en af de behandskede fingre på den ene hånd til at holde ved manchetten, mens handskens fjernes med vrangen udad. Nu bruges hånden uden handske til at tage fat i den vendte manchets på den anden handske. Denne handske vendes også med vrangen ud, mens den fjernes. Smid handskerne væk og desinficer hænderne.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU00341812


Mölnlycke®