

# Mefix®

## Kiinnitysmateriaali

Mefix on ihanteellinen kiinnitysmateriaali sidokselle, taitoksille, katetreille ja kanyyleille. Se tarjoaa varman kiinnittymisen ja on hellävarainen iholle.



### Miten Mefix toimii

Elastisen kuitukankaan huokoinen rakenne takaa ilman ja vesihöyryn läpäisevyyden. Kangas on joustavaa ja se mukautuu hyvin kehon muotoihin eikä rajoita liikkumista. Materiaali ei ole imukykyinen. Se tarjoaa esteen veren ja eritteiden läpipääsulle. Polyakrylaattikiinnitysaine on suunniteltu ihoystävälliseksi, mutta takaa samalla varman kiinnittymisen.

Helposti poistettava taustapaperi on merkitty 10 cm välein ja siinä on perferoitu taitoskohta, joka helpottaa poistoa ja iholle asettamista. Mefix voidaan helposti leikata haluttuun muotoon ja kokoon.


### Käyttöalueet

Mefix on ihanteellinen tapauksissa, joissa kiinnitystä tarvitaan, kuten sidosten, taitosten, katetrien ja kanyyliin kiinnitys.

### Miten Mefixia käytetään - Kiinnittäminen S-perforoinnin avulla



Leikkaa oikean kokoiseksi.

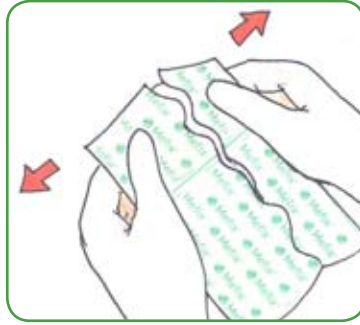

Eroita kaksi suoja-paperin osaa erilleen toisistaan hieman venyttämällä ja taittamalla Mefixia. Poista pienempi osa.



Aseta kiinnitysaineellinen puoli ihoon kiinni. Tämän jälkeen irroita jäljellä oleva taustapaperi. Paina Mefix tiukasti ihoon kiinni, jotta se kiinnittyy kunnolla. Älä venytä Mefixia asettaessasi sitä iholle.

### Mefixin edut

- Ihoystävällinen, vesipohjainen, liuottimeton kiinnitysaine
- Merkitty suoja-paperi, joka mahdollistaa mittauksen ja leikkauksen
- Mukautuu hyvin kehon eri muotoihin
- Hengittävä, estää maseraation syntymistä ja on mukautuvainen
- Voidaan höyry- ja EtO-sterilisoida

### Huomaa

Mefixiä ei saa venyttää asettamisvaiheessa, jotta voidaan välttää ihon pintakerrosten vaurioituminen kuten rakkulamuodostus. Tämä on tärkeää erityisesti nivelalueiden päälle asetettaessa.



Mefix on saatavana epästeriilinä 10 tai 2,5 metrin rullana kuljetuspakkauksessa.

Tuote nro	Leveys cm	Laatikkoa / Kuljetuspakkauksessa
<b>10 metrin rullat</b>		
310250	2,5	40
310500	5	40
311000	10	20
311500	15	15
312000	20	10
313000	30	10
<b>2,5 metrin rullat</b>		
310570	5	30
311070	10	30
311570	15	20