



Påkledningsveiledning: Operasjonsmunnbind med knytebånd

- A. Form nesebøylen. Plasser operasjonsmunnbindet over ansiktet og pass på at du dekker nese og munn.
- B. Plasser de øvre knytebåndene på toppen av hodet og stram til for å hindre lekkasje på sidene.
- C. Plasser de nedre knytebåndene i nakken og stram til.
- D. Fold alltid munnbindet helt ut for å minimere antall lag du må puste gjennom.
- E. Bytt operasjonsmunnbind dersom det er kontaminert og mellom operasjoner.
- F. Når det er risiko for væskesprut, bruk et sprutsikkert operasjonsmunnbind og vernebriller eller et sprutsikkert operasjonsmunnbind med visir.
- G. Kast operasjonsmunnbindet etter bruk.