



## BARRIER® TUR set

- Integrerad vätskeuppsamlingspåse för effektiv vätskehantering
- Integrerad stark sil för enkel och säker insamling av prover
- Latexfri fingertuta för säker rektalpalpation
- Suprapubisk hål med häftande kanter som ger effektiv förslutning
- Täckta flexkanter stabiliserar påsen när den expanderas och är säker att använda
- Finns i två storlekar för att möta olika draperingsbehov
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet
- Optimal vikning för en aseptisk applicering, lätt för en person att drapera
- Användarvänlig avdelningsförpackning med grepphandtag på för en effektiv hantering



# Draperingsinstruktioner



1. Placera lakanet i rätt riktning, se pictogram.



2. Öppna lakanet mellan patientens ben, notera fotpilen (pictogram).



3. Vik ut lakanet.



4. Drapera ett ben.



5. Drapera det andra benet.



6. Vik ut lakanet över benen och fortsätt mot patientens huvud, och sedan över anestesiången.



7. Drapingen är slutförd.

| Art. Nr. | Beskrivning   | Avd/Trp |
|----------|---|---------|
| 888222   | <b>TUR set</b><br>1 Cellduk, 18x25 cm<br>1 Slanghållare 9x18 cm, häftande<br>1 TUR lakan 175/270x180 cm med uppsamlingspåse, hål 8 cm och 5 cm, fingertuta<br>1 Instrumentbordslakan 150x190 cm, absorptionsyta 75x190 cm       | 6/12    |
| 888224   | <b>TUR set</b><br>1 Cellduk, 18x25 cm<br>1 Slanghållare 9x18 cm, häftande<br>1 TUR lakan 175/270x180 cm med uppsamlingspåse/slang, hål 8 cm och 5 cm, fingertuta<br>1 Instrumentbordslakan 150x190 cm, absorptionsyta 75x190 cm | 7/14    |
| 888225   | <b>TUR set</b><br>1 Cellduk, 18x25 cm<br>1 Slanghållare 9x18 cm, häftande<br>1 TUR lakan 175/270x180 cm med sil, hål 8 cm och 5 cm, fingertuta<br>1 Instrumentbordslakan 150x190 cm, absorptionsyta 75x190 cm                   | 7/14    |
| 888226   | <b>TUR set</b><br>1 Cellduk, 18x25 cm<br>1 Slanghållare 9x18 cm, häftande<br>1 TUR lakan 175/270x240 cm med uppsamlingspåse, hål 8 cm och 5 cm<br>1 Instrumentbordslakan 150x190 cm, absorptionsyta 75x190 cm                   | 6/12    |
| 888227   | TUR lakan 175/270x240 cm med uppsamlingspåse, hål 8 cm och 5 cm, fingertuta   | 8/16    |

Samtligt specificerat innehåll i seten finns också tillgängligt att inkludera i Mölnlycke® kundanpassade set.

| Art. Nr. | Kundanpassade set komponenter  |
|----------|--|
| 965527   | TUR lakan, 175/270x240 cm med uppsamlingspåse, hål 8 cm och 5 cm, fingertuta       |
| 965522   | TUR lakan, 175/270x180 cm med uppsamlingspåse/slang, hål 8 cm och 5 cm, fingertuta |
| 965520   | TUR lakan, 175/270x180 cm med uppsamlingspåse, hål 8 cm och 5 cm, fingertuta       |

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen.  
© 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0501806