

BARRIER® Hand- och fotlakan



- Förstärkt material i det kritiska området för bättre hållbarhet och infektionskontroll
- Drisite® Plus för god vätskehantering där materialet utsätts för rikligt med vätska
- BARRIER® hand- och fotlakan är specialdesignat för både hand- och fotkirurgi
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet
- Optimal vikning för aseptisk hantering, lätt för en person att drapera



1. Fotlakan: Vik ut lakanet och placera det under patientens ben. Placera lakanet i den riktning som anges på instruktionsetiketten.



2. Placera operationslakanet över patientens fot. För foten genom det elastiska hålet.



3. Vik ut lakanets nedre del mot fotändan.



4. Vik därefter ut lakanets övre del upp mot huvudändan över narkosbågen.



1. Handlakan: Vik ut lakanet och placera det under patientens hand. Placera lakanet i den riktning som anges på instruktionsetiketten.



2. Placera operationslakanet över patientens hand. För patientens hand genom det elastiska hålet.



3. Vik ut lakanets övre del upp mot huvudändan över narkosbågen.



4. Vik därefter ut operationslakanet ner över operationsbordets fotände.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtiionsyta	Art./Trp.
60303	Hand-och fot set: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 1 x Hand-och fotlakan, elastiskt hål 3.5 cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 230 x 315cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm	7 / 14
60302	Hand-och fot set: 1 x Hand-och fotlakan, elastiskt hål 3.5 cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan 1 x Omslagspapper	230 x 315cm 150 x 190cm 100 x 100cm	75 x 190cm	7 / 14
60308	Hand-och fotlakan, elastiskt hål 3.5 cm	150 x 180cm		13 / 52
60309	Hand-och fotlakan, elastiskt hål 3.5 cm	230 x 315cm		11 / 22

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke® kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70308	Hand-och fotlakan, elastiskt hål 3.5 cm	150 x 180cm
70309	Hand-och fotlakan, elastiskt hål 3.5 cm	230 x 315cm

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0351803

Mölnlycke®