



BARRIER® Hybridlakan Kardiovaskulär

- **Allt-i-ett-lakan** gör det möjligt för endast en person att drapera och sparar tid preoperativt
- **Extra stort** 4,5 m lång och 2,4 m bred för att täcka större operationsbord
- **Incisionsfilmer** placerade för både titthålskirurgi och öppen kirurgi såväl som femorala perkutan tillgång
- **Förstärkt område** längs hela längden av patienten för absorption och extra styrka
- **Klar plastfilm** på sidorna, vilket ger en steril barriär mot kontrollpaneler och visuell kontroll av C-bågen
- **Påsar på sidorna** för att underlätta hantering av slangar, instrument och vätskor

Draperingsinstruktion



1. Fäst de självhäftande handdukarna för att markera operationsområdet på sidorna.



2. Ta bort skyddspappret och placera operationslakanet i mitten på bröstet.



3. Den övre kanten av incisionsfilmen bör fästas högt upp på halsen. Tryck för att fästa incisionsfilmen.



4. Vik ut åt sidorna.




5. Ta bort skyddspappret. Se till att centrera operationslakanet på patienten.



6. Vik ut lakanet över patientens ljumskar.



7. Vik sedan ut lakanet mot patientens fötter. Tryck för att fästa incisionsfilmen.

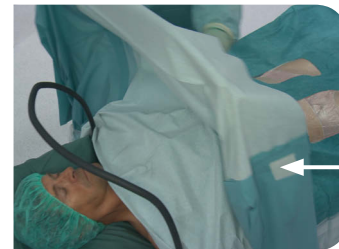

8. Vik till sist ut lakanet mot patientens huvud. Självhäftande tejp finns på lakanet för en säker och enkel placering över narkosbågen.

Ref. nr.	Beskrivning	Avd. fp./Trp. fp.
61800	Hybrid Kardiovaskulär set 1 Hybridlakan Kardiovaskulär 240/300x450 cm, incisionsfilm 60x40 cm och 15x27 cm (2) 2 Självhäftande handdukar 1 Instrumentbordslakan 150x190 cm, absorptionsyta 75x190 cm	5/10

Samtligt specificerat innehåll i seten finns också tillgängligt att inkludera i ProcedurePak® set.

För ytterligare information om Mölnlycke Health Care och denna produkt scanna QR-koden nedan.

BARRIER uppdukningsmaterial

- Optimal patientsäkerhet med 100% impermeabla material
- Optimal vikning för aseptisk drapering, enkel för en person att drapera



Läs mer på www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 53 Göteborg
Telefon 031-722 30 00, fax 031-722 34 01. www.molnlycke.com

Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen, ProcedurePak® och BARRIER® är registrerade varumärken av Mölnlycke Health Care AB. Copyright (2011)



**MÖLNLYCKE
HEALTH CARE**