



## **BARRIER®** Laparoskopilakan

- Allt-i-ett-lakan med integrerade funktioner
  - för enkel och effektiv drapering av en person
  - för att spara tid
  - för att minska risken för kontaminering
- BARRIER® Flex har flexibla och formbara självhäftande kanter som möjliggör en effektiv förslutning när buken insuffleras
- Fyra integrerade slanghållare för att skapa ett effektivt arbetsområde
- Integrerade djupa påsar anpassade till laparoskopiska instrument
- 100% vätsketätt material som ger optimal patientsäkerhet

# Draperingsinstruktion



1. Notera riktningen på pikto-grammet på laparoskopilakanet. Ta bort skyddspappret.



2. Placera lakanet centrerat på patienten.



3. Tryck försiktigt för att fästa limkanterna. Vik ut lakanet mot dig själv och sedan ifrån dig.



4. Vik ut lakanet mot patientens fötter.



5. Vik sedan ut lakanet mot patientens huvud.



6. Draperingen är nu slutförd.



7. Använd de integrerade påsarna och slanghållarna för att skapa ett effektivt arbetsområde.

Artikel nr.	ProcedurePak komponenter
954226	Laparoskopilakan 200/250x340 cm, hål 32x30 cm

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Telefon 031-722 30 00, [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)  
Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen, ProcedurePak® och BARRIER® är registrerade varumärken av Mölnlycke Health Care AB. © 2016. Mölnlycke Health Care AB. Eftertryck förbjudes.