

BARRIER® Operationslakan för ryggingrepp



- Transparent produkt som är enkel att använda
- Tydliga instruktionsetiketter för snabb drapering
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet
- Optimal vikning för aseptisk hantering, lätt för en person att klä patienten



1. Håll operationslakanet med instruktionsetiketten i rätt riktning.



2. Ta bort skyddspapperet med hjälp av en eller två personer.



3. Placera operationslakanet mitt över operationsområdet.



4. Fixera incisionsfilmen.



5. Vik ut operationslakanets övre del över narkosbågen och vik sedan ut det mot fotändan.



6. Placera operationslakanet i önskat läge och vik sedan ut det.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtionsyta	Avd./Trp.
80005471	Operationsset för ryggingrepp: 1 x Självhäftande op-duk 1 x Operationslakan för ryggingrepp, incisionsfilm 30 x 60cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	175 x 150cm 320 x 240cm 150 x 190cm	75 x 190cm	7 / 14

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
80008030	Operationslakan för ryggingrepp, incisionsfilm 30 x 60cm	320 x 240cm

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0331803