





## Förband med upprensande natriumklorid

Mesalt stimulerar effektivt upprensningen av kraftigt vätskande och infekterade sår.


Absorberande viskos/  
polyester nonwoven  
impregnerat med  
natriumklorid

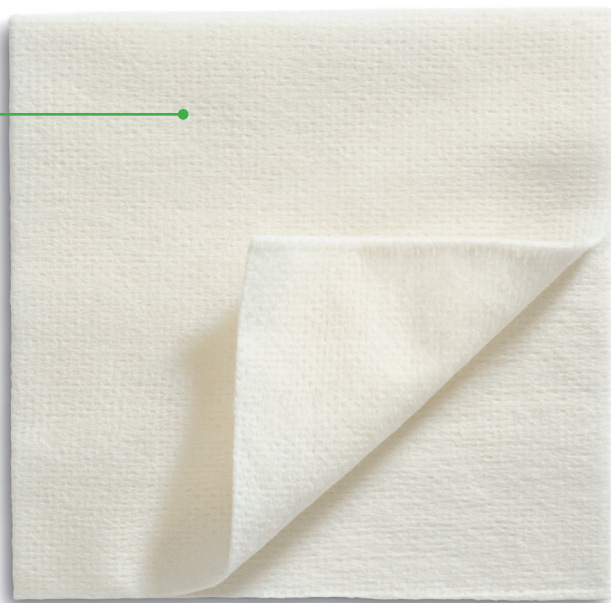


## Så här används Mesalt®

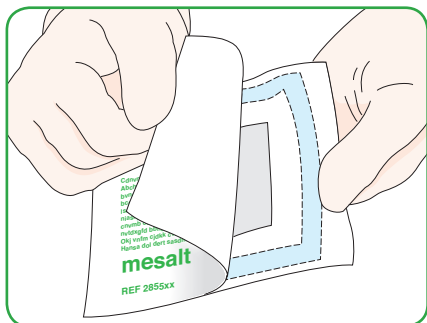

Rengör såret och öppna förpackningen.

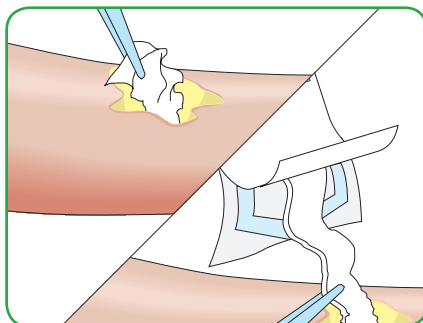

Applicera eller fluffa torr Mesalt löst i såret. Blöt inte förbandet i förväg.

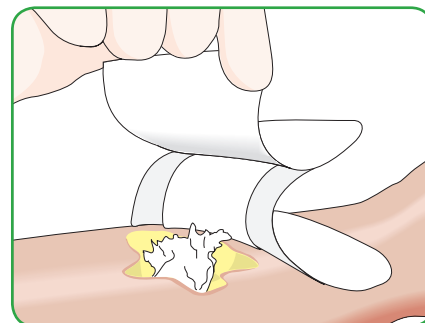

Applicera ett täckande ytterförband. Beroende på sekretion byts Mesalt dagligen eller oftare om nödvändigt.

## Så här fungerar Mesalt

Vätskan från såret frisätter natriumklorid från förbandet. Mesalt stimulerar effektivt upprensningen av sår i den inflammatoriska fasen genom att absorbera sårsekret, bakterier och nekrotisk vävnad från såret och främjar därmed den naturliga sårhelingsprocessen.

## Fördelar med Mesalt

- Stimulerar debridering
- Minskar mängden bakterier
- Enkelt att använda

## Användningsområde

Mesalt är avsett för behandling av kraftigt vätskande och infekterade sår i inflammationsfasen såsom:

- Trycksår
- Kirurgiska sår

## Observera

Mesalt ska inte användas på torra sår.

## Mesalt sortiment

(levereras sterila, enstycksförpackade)

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
285580	5 × 5	30	240
285780	7,5 × 7,5	30	240
286080	10 × 10	30	180
285280	2 × 100	10	80



Mer information på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB

Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00

[www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

[www.molnlycke.se/patient](http://www.molnlycke.se/patient)

The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepilex® Border Lite are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

